



TRITON DUAL

Bade- og toiletstol med elektrisk højdejustering og sædetilt

FORBEDRET ARBEJDSMILJØ OG MERE KOMFORT

- Et godt arbejdsmiljø, hvor overbelastning af plejerens ryg, lænd, skuldre og knæ undgås.
- For brugeren giver den indstillelige stropryg en god siddekomfort og yder en god støtte. Sædetiltet medvirker til en god og tryk placering i stolen. Begge dele er med til at give brugeren en komfortabel siddestilling.
- Højdejusteringen er god for såvel plejen som brugeren
- For plejen sikrer højdejusteringen den optimale indstilling af stolen de forskellige plejesituationer.
- For brugeren giver højdejusteringen øget selvstændighed, da det er muligt at indstille stolen, så brugeren selv kan komme op til håndvask og spejl og derved tage del i sin egen personlige hygiejne.

FUNKTIONER OG EGENSKABER

- Stor sikkerhed og vaskbarhed (IPX6W-klassificeret)
- Digitale styrebokse sikrer, at hvis sædet er tiltet forover og herefter hæves, så vil DUAL security-funktionen automatisk køre sædet til -5° bagover. Herved undgår man, at brugeren føler, at han eller hun er ved at falde ud af stolen.
- Transportfunktion, hvor stolen ved ét tryk på håndbetjeningens transportknop automatisk kører i en transportposition, hvor stolen og dermed fodstøtten hæves, så hjulene kan bevæge sig frit.
- Herudover har Triton/Dual to valgfri programmeringsknapper, som frit kan indstilles og benyttes i forhold til såvel plejens som brugerens behov, så stolen hurtigt og nemt kommer i den korrekte position, hver gang den benyttes.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. brugervægt: 150 kg

Afstand mellem armlæn: 470 mm

Sædedybde: 430 mm

Sædebredde: 460 mm

Sædehøjde: 535-950 mm

Total bredde: 570 mm

Længde: 880-1050 mm

Total højde: 1065-1480 mm (uden nakkestøtte)

Vægt: 41 kg

Tiltvinkel: +7° til -30° +2°

Tæthedsklasse: IPX6W

Ladetid: 6 timer

Batteri-kapacitet:
80-100 løft på én ladning

	Varenr.	HMI-nr.
TRITON DUAL	044-00050	109163
TRITON DUAL m/nødstop og nødfir	044-00051	109902

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Elektrisk højdejustering (Soft Start/Stop).
- Elektrisk sædetilt (+7° / -30°) og indstillelig stroppryg giver øget komfort og brugerstabilitet.
- IPx6W klassificeret: Takket være LINAK IPX6 Washable DURA™ er Triton/Dual testet til at kunne klare op til 250 gange i vaskemaskine (mod normalt 50 gange i vaskemaskine).
- Udviklet efter Easy-Clean princippet, dvs. uden kroge og små kanter. Stolen har lukkede skruer/sammeføjninger samt fuldsvejset stel, som hindrer der står vand i rørene. Behandlet med dobbeltcoating, hvilket betyder stor resistens overfor rust.
- DUAL security-funktionen sikrer, at stolen ikke kan løftes og tiltes fremad samtidig.
- Transportfunktion på håndbetjeningen, som indstiller stolen til sikker transport af brugeren.
- To programmeringsknapper på håndbetjeningen til automatisk indstilling og positionering af stolen.
- Multi-indstillelig nakkestøtte med indbygget stang, som ikke-beskadiger væggen bag ved toilettet.
- Stolen passer ind over alle standard toiletter
- Max brugervægt 150 kg



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

