




COBI REHAB®
The Positioning Company

Cobi Hybrid

– en kombinationsmadras

Helmadrass til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere med risiko for tryksår stadie 1-4

Cobi Hybrid madrassen kan bruges med og uden tilslutning af pumpe, og derved kan den benyttes til et bredt udvalg af patienter, der har brug for trykaflastning.

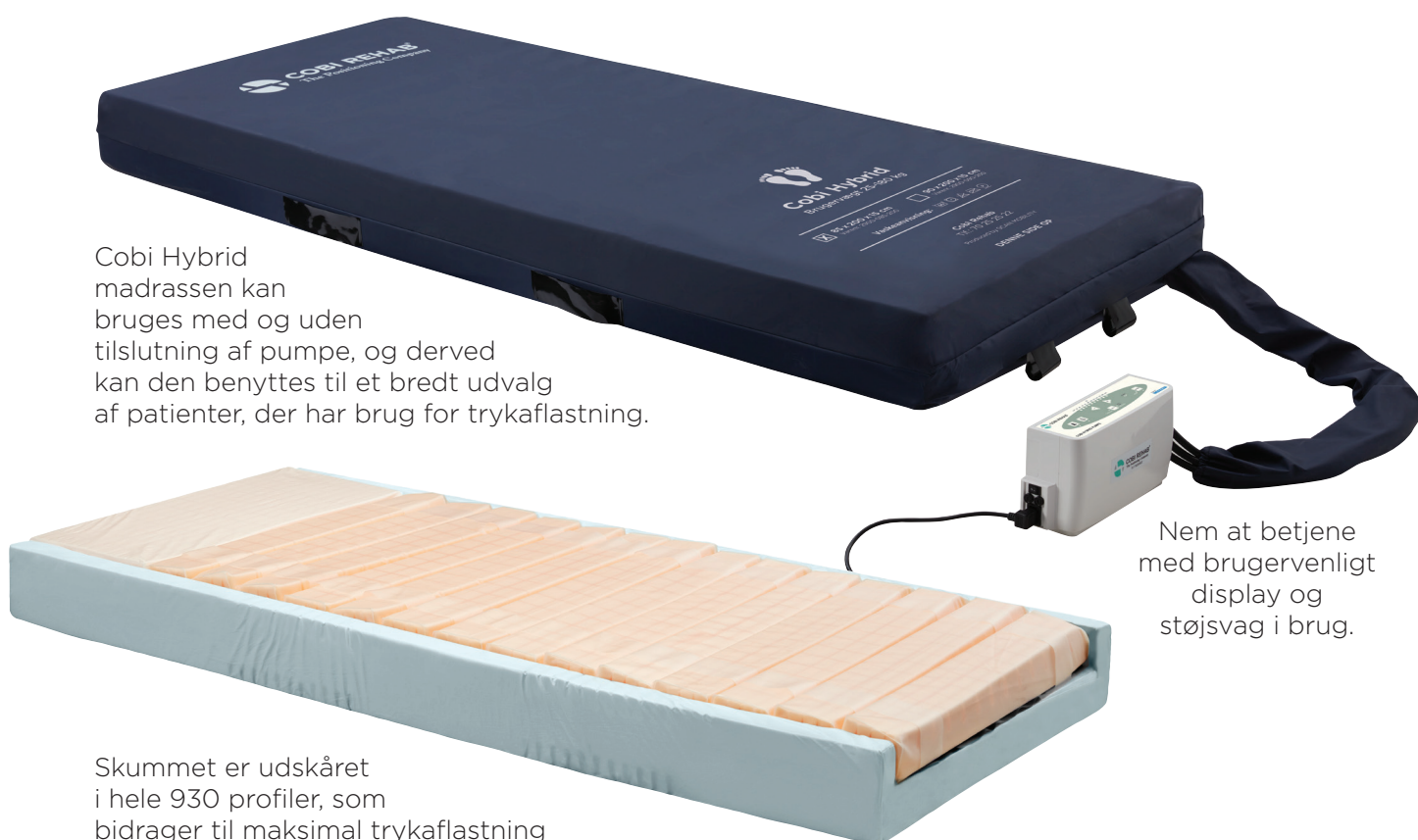

Nem at betjene med brugervenligt display og støjsvag i brug.

Skummet er udskåret i hele 930 profiler, som bidrager til maksimal trykaflastning og komfort for brugeren. Alle skumelementer er pakket ind i et beskyttende hygiejne lag, der sikrer mod væske- og fugtindtrængning.

- Kombination af skum- og vekseltryks helmadrass
- Til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4
- Mulighed for at etablere hælzone
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre
- Lydsvag pumpe
- Luftcellerne pumper op i en 1-3 cyklus, som trykaflaster mere behageligt, end en normal 1-2 cyklus

Anvendes med fordel til...

- Brugere, der er alment svækkede eller tryksårstruede.
- I hjemmeplejen.
- På plejecentre.
- På sygehuse.
- I sundhedssektoren.

Cobi Hybrid – en kombinationsmadras

Helmadrass til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere med risiko for tryksår stadie 1-4

Cobi Hybrid er en tryksårsforebyggende helmadrass, som kombinerer høj kvalitetsskum og vekseltryk. Madrassen kan anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4.

Cobi Hybrid madrassen kan bruges med og uden tilslutning af pumpe, og derved kan den benyttes til et bredt udvalg af patienter, der har brug for trykaflastning. Pumpen indstilles efter vægt til hver enkelt bruger. Trykket i pumpen kan også præjusteres. Mulighed for at etablere hælzone.

Madrassen har 14 celler for at give maksimal trykaflastning og komfort for brugeren.

Anvendelse som skummadrass

Cobi Hybrid fungerer som en reaktiv trykaflastende skummadrass, når pumpen ikke er tilsluttet. Skummet er udskåret i hele 930 profiler i varierende størrelser. Profilerne er individuelt fleksible og deformérbare. Det giver en tilpasset og effektiv trykfordeling af hele kroppen.

Alle madrassens celler kan udskiftes, og man kan med fordel fjerne en eller to af de sidste for at skabe en hælzone.

Anvendelse som vekseltryksmadras

Når pumpen er tilsluttet, fungerer Cobi Hybrid som en aktiv vekseltryksmadras, der kan anvendes til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4. Luften pumpes ind i 14 tværgående luftceller, der omkranser skumprofilerne. Cyklusen kører over 10 minutter og kan arbejde med enten et højt eller lavt tryk. Pumpen er støjsvag og har et lavt strømforbrug.

Cobi Hybrid madrassen ændrer ikke højde, når pumpen tilsluttes og luften pumpes ind. Det betyder, at der ikke er behov for at ændre på seng, lagner eller sengeheste, når vekseltryksfunktionen benyttes.

En hælzone kan etableres ved at koble en eller to af de sidste celler fra, for yderligere aflastning.

Madras

- Består af 14 tværgående og skumfyldte luftceller, konstrueret af Low Shear nylon.
- Vandret, rørformet cellekonstruktion der sikrer optimal komfort og omfordeling af tryk.
- Cellerne er lavet af lavstøjs materialer, der giver en rolig søvn.
- I vekseltryks-tilstand vil hver 3. celle i madrassen skiftevis aftage i tryk hvert 10. minut.
- Alle skumelementer under betrækket er pakket ind i et beskyttende hygiejne lag, der sikrer mod væske- og fugtindtrængning.

Pumpen

- Har funktionsindstilling til at skifte mellem Autofirm funktion eller vekseltryks-funktion.
- Autofirm funktionen slår selv fra efter 20 minutter.
- Har Siddefunktion.
- Pumpen indstilles efter vægt til hver enkelt bruger.
- Trykket i pumpen kan også justeres manuelt.
- Alarm ved strømfejl og ved tryk-fald.
- Luftcellerne pumper op i en 1-3 cyklus, som trykaflaster mere behageligt end en normal 1-2 cyklus.

Betræk

Betrækket er et Low Shear, inkontinens og åndbart betræk, der kan strækkes i fire retninger. Derved bidrager betrækket til at reducere tryksårs udvikling og hjælper med at forhindre opbygning af fugt fra kroppen, samtidig med betrækket forbliver vandtæt. Det bevirker en reduktion af varmeopbygningen.

Betrækket er klorresistent, har en anti-bakteriel behandlet overflade og er flammehæmmende. Tåler vask og desinfektionsmidler.

Kontraindikationer

Brugere med flg. Diagnoser må ikke benytte systemet:

- Ustabile columna frakturer
- Ustabile frakturer generelt
- Konsultér ALTID læge eller terapeut før brug af vekseltryks-funktionen på Cobi Hybrid.

Cobi Hybrid

Specifikationer


Cobi Hybrid	
Brugervægt	25-180 kg
Længde	200 cm
Bredde	85 / 90 cm
Højde	15 cm uden pumpe / 18-20 cm med maksimalt tryk på pumpe
Madrassens vægt	13,5 kg
Pumpens mål	30 x 16 x 11 cm
Pumpens vægt	2,2 kg
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømtab	Ja
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficérbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	1-4
Madrasbetræk	Polyamid med polyurethan beklædning. Økotex 100.
Celler	Lyddæmpede celler af polyether TPU.
Skum	Skum af polyether polyuretan. Overholder brandkrav: S1 P1 1988 S.I. No. 1324.
Pumpe	Lydsvag, 10 tryk-niveauer. Luftcellerne pumper op i en 1-3 cyklus, som trykflaster mere behageligt end en normal 1-2 cyklus.
Holdbarhed	Ca 7 år afhængigt af brug og vedligeholdelse.
ISO - klassifikation	ISO 9001:2015

Anvendes med fordel til...

- Brugere, der er alment svækkede eller tryksårstruede.
- I hjemmeplejen.
- På plejecentre.
- På sygehuse.
- I sundhedssektoren.



Cellerne er lavet af lavstøjs materialer, der giver en rolig søvn.

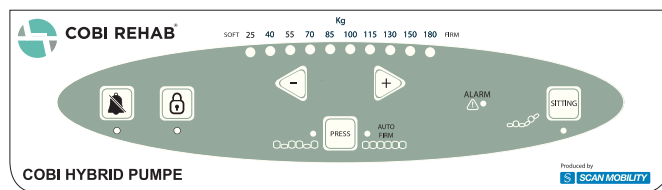

Pumpen indstilles efter vægt til hver enkelt bruger, men kan også manuelt indstilles i flere trin, hvis man ønsker en blødere eller fastere understøtning.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobi Hybrid	200	85	15 cm uden pumpe / 18-20 cm med maksimalt tryk på pumpe	2900-085-200	111293
Cobi Hybrid	200	90	15 cm uden pumpe / 18-20 cm med maksimalt tryk på pumpe	2900-090-200	111294





COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com