

eLEA

INDBLIK – PROAKTIVITET – TRYGHED

HMI-nr.: 109554

Pris: Fra 5.100,- + licens



tsk-detektor

Tilbehør

- gateway
- dødkontakt
- alarmvedhæng
- plejetelefon
- alarmknop
- regalarm
- sengesensor



gateway



dødkontakt



alarmvedhæng




plejetelefon



alarmknop



regalarm

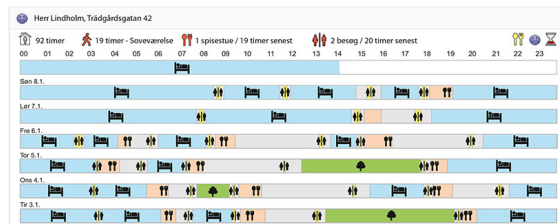

92 timer 19 timer - Sovetid / 19 timer senest 1 spolestue / 19 timer senest 2 besøg / 20 timer senest

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

San 8.1
Lør 7.1
Fre 6.5
Tor 5.1
Ons 4.1
Tir 3.1

Dette eksempel på en kort 7-dages graf viser, at beboeren har opholdt sig i soveværelset i en længere periode. Beboeren var sidst i køkket 19 timer siden og har kun foretaget to toiletbesøg. Alarmer udløses når aktivitetsregistreringens grænser overskrides. Alarmer kan også udløses baseret på begivenheder som "manglende spisning", "passivitet (ingen bevægelser om morgenen)" eller "for lang tid i soveværelset" (koncerne i øverste højre hjørne af diagrammet).

Den langsigtede 6 måneders graf viser normalt aktivitetsniveau. Beboerens dagsaktiviteter er inden for de forudindstillede parametre i alle områder.



Den anden 6-måneders aktivitetsgraf viser, at beboerens tilstand er forringet på en måde, der ellers ville forblive ubemærket.



- **Aktivitetsmonitorering hjælper med at få øje på ændret adfærd**
- **Installeres nemt i private boliger**
- **Tilknyt alarmer efter behov, f.eks. brandalarm**
- **Tryghed for borger og pårørende**

eLEA består af sensorer, der nemt installeres i de forskellige rum i borgerens hjem. Sensorerne giver viden om borgerens aktiviteter, f.eks. om borgeren ligger i sengen, åbner køleskabet eller går på badeværelset.

eLEA viser oplysningerne om borgerens aktiviteter ved hjælp af nemt forståelige symboler og kan kombineres med forskellige alarmer, der sendes til en udvalgt mobiltelefon. Alarmer kan f.eks. være faldalarm.